



DNAmyself

Personalised Genetics





1. Ξεβιδώστε το καπάκι από το φιαλίδιο. Κρατήστε το για αργότερα. Βιδώστε το ειδικό εξάρτημα συλλογής σιέλου στο φιαλίδιο.

2. Φτύστε μέσα στο φιαλίδιο, μέχρι το επίπεδο του υγρού μέσα στο φιαλίδιο, χωρίς τις φυσαλίδες, να φτάσει στην γραμμή των 4ml. Η διαδικασία αυτή συνήθως διαρκεί 2-5 λεπτά.

3. Ξεβιδώστε το εξάρτημα συλλογής σιέλου και βιδώστε το αρχικό καπάκι. Πετάξτε το εξάρτημα συλλογής σιέλου.

4. Ανακινείτε ελαφρά το φιαλίδιο 3 φορές πάνω-κάτω.

5. Τοποθετήστε το μέσα στο κουτί DNAmyself για αποστολή με την συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών.

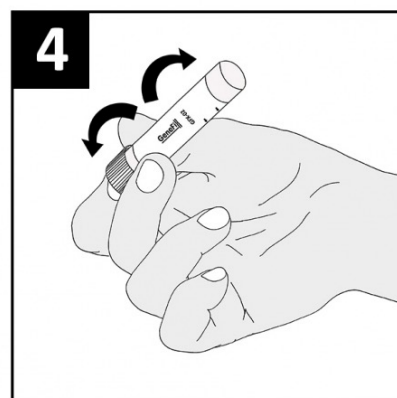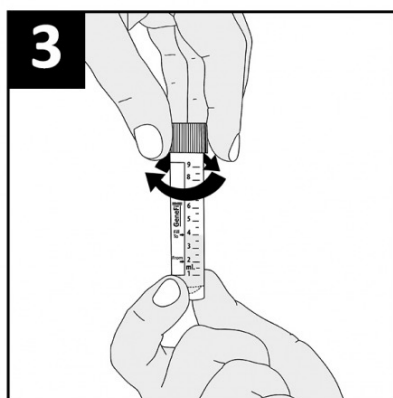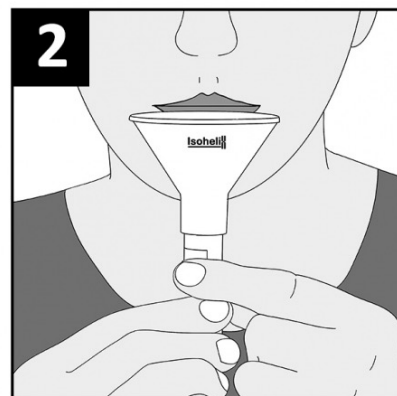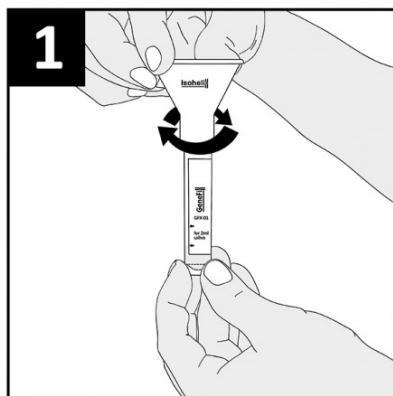

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΣΑΣ.



➤ Παρακαλούμε, μην φάτε, πιείτε, καπνίσετε, βουρτσίσετε τα δόντια σας ή μασήσετε τσίχλα 30 λεπτά πριν την χρήση του kit συλλογής γενετικού υλικού.